

# マイボイス 「ガイド録音」編

## 📌 準備するもの

☐パソコン ☐ヘッドセット ☐お好きな飲み物

☐マイボイス Ver.9.61

\*ハーティリーダーサポーターHP よりダウンロードして下さい（無料）

\*今回は「ガイド録音」を使って編集をするので、必ずマイボイスは Ver9.61 をダウンロードしてください

## 👤 発声のコツと練習

- ① まず自分が普通に日常発音している**声の高さ**で「上」を「上、上、上…」と数回と発声してみましょう
  - ② その「上」の**高さ**と**アクセント**（上＝低め「う」＋高め「え」）で「あい、いう、うえ、えお、おあ」と発声して下さい
  - ③ そして、そこに2文字目を繰り返して「あいい、いうう…」という感じで「おああ」まで発声してみましょう
- \*この感じで、これから録音していく音素を発音していきます

## 🎧 「ガイド録音」を使ってみよう


- ①ヘッドセットの準備ができれば、デスクトップ上にある「マイボイスの音素編集」をダブルクリック



- ② 「ガイド録音」をクリック




- ③ 「●あいい」をクリック（選択）し、その後「ガイド録音」をクリック

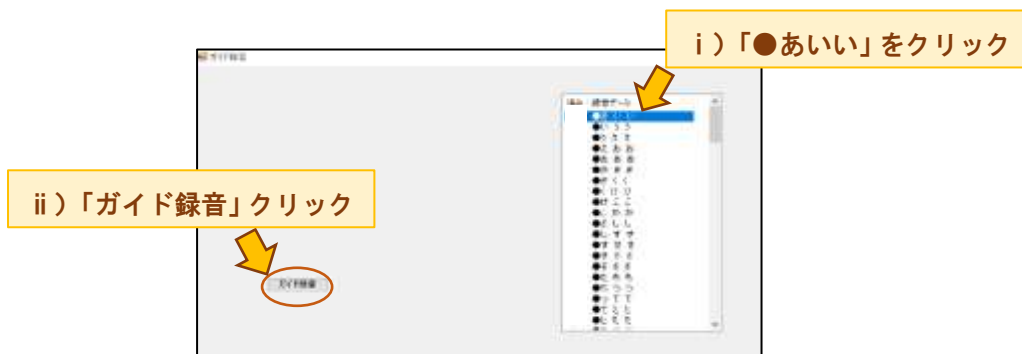

④本間先生の声で、録音が始まります。

注意「本間の声」はアクセントの低め高めだけの参考にし、基本の高さはご自身の声質に合わせてください。

指示通りに録音を進め、自分の声を確認し、良ければ「保存 次へ」を、とり直したい時は「再録音」をクリック

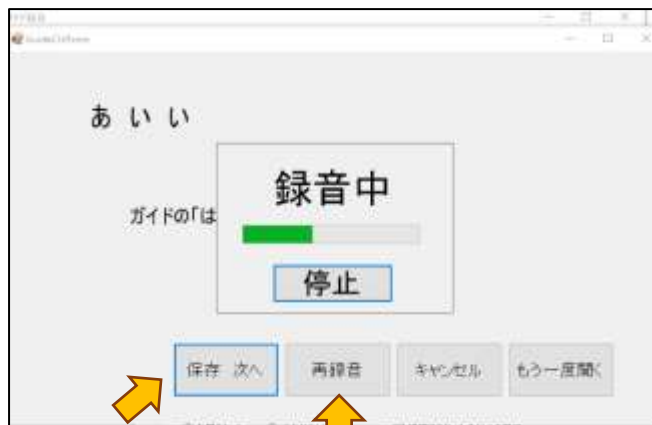


良ければ「保存 次へ」をクリック


とり直したい時は「再録音」をクリック

キャンセル:録音のキャンセル 録音が中断されるので、休憩をしたいときはここを押して、再開する時に「ガイド録音」から開始したい音素を選択して再開する

⑤全部録音できたら、編集画面に戻りましょう（録音できた音声データは、横にチェックがついていきます）

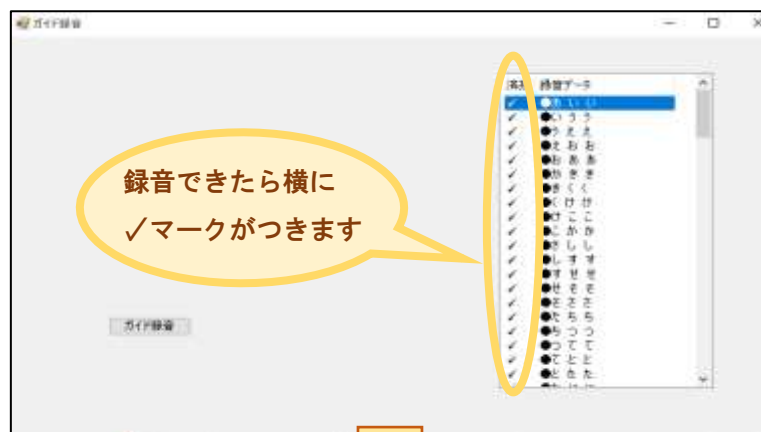

この画面に戻りましょう

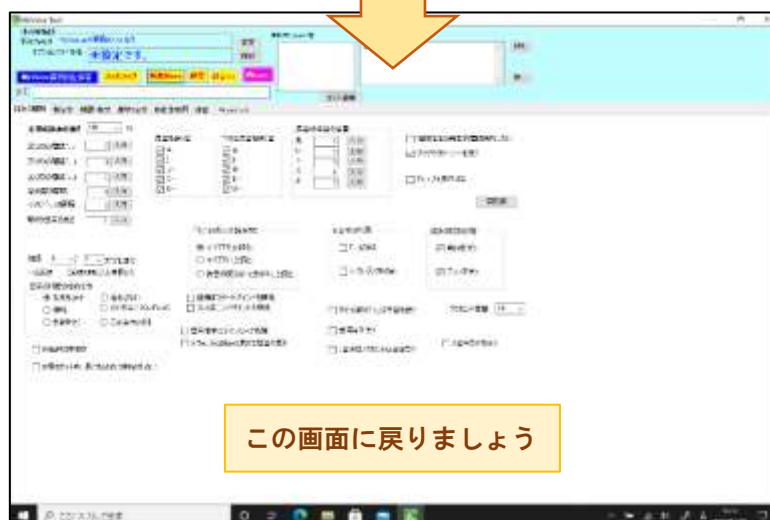



# 録音完了！



## 編集作業(切り出し、登録など)をしてみよう

💡「マイボイスのデータ作成 ハーティーラダー・サポーター」で検索すると、マイボイスの編集方法などが動画で詳しく説明されています。ぜひそちらも参考してみてください(但し、ガイド録音機能が付く前のマイボイス編集動画のため、一部以下の編集方法と異なる点があります)

編集作業をするにあたって、これから音素 A やら音素 N など聞きなれない言葉が何度も出てきますですが、これは大事ことなので先に確認しておきましょう

### 【単音素】

- ・音素 A：単語や文の最初の音
- ・音素 N：語中の音
- ・音素 E：文末の音


\*本当はもっといろいろな音素があり、それも録音した方がより自分らしい表現に近づけますが、ひとまずこの 3 つの音素で今回は編集していきます



音素 A	音素 N	音素 E
あ	い	い


つまり、「あ い い」の「あ」が一番最初に発した「あ」なので、音素 A の「あ」、「あ い い」の「い」は文中の「い」のため音素 N の「い」、同様に「あ い い」の「い」は文末の「い」なので、音素 E の「い」ということになります

- ⑤では上記を踏まえ、始めていきましょう！ まずは「録音 file」をクリック
- ⑥「基本」フォルダをダブルクリック (ここにさっき録音した音声データが入っています)
- ⑦「 あい い」をダブルクリック (右下の「開く」をクリックしても可)

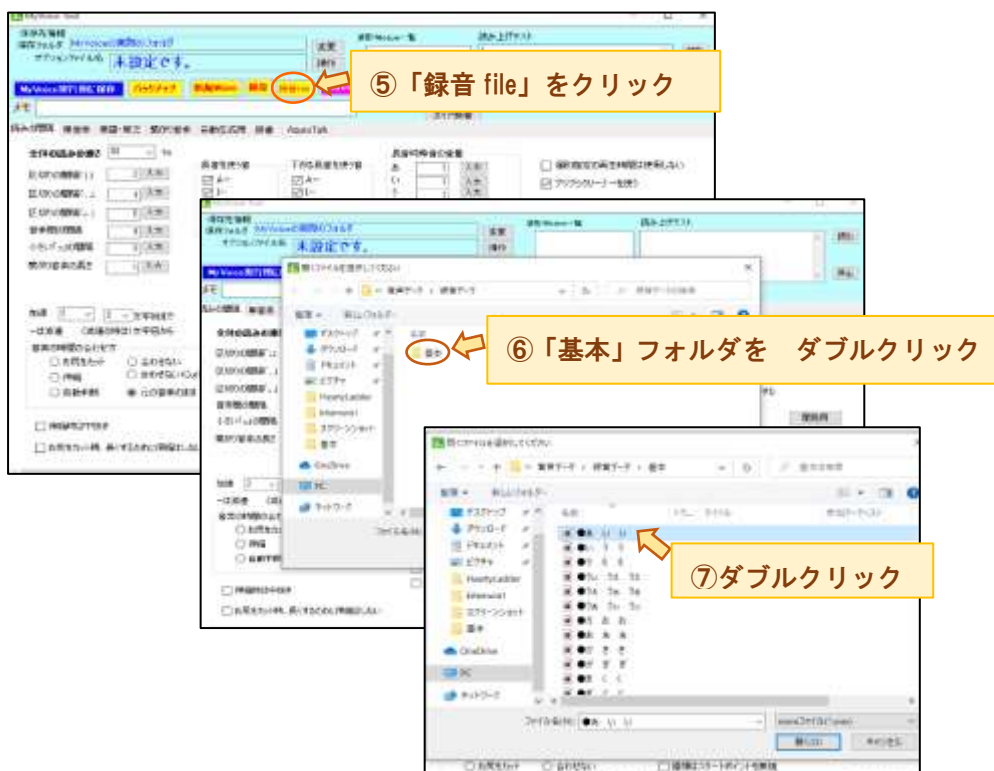



- ⑧出てきた音声の波形の最初の山の上をダブルクリックすると・・・  
最初の山が範囲指定され、「あ」の音素が切り出された状態になります

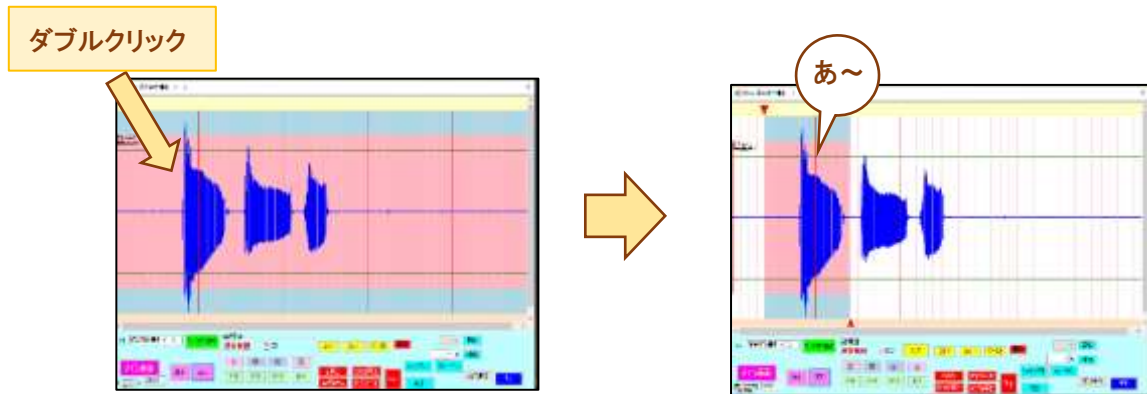

- ⑨切り出した音素を登録していきましょう

音素の波形は残したまま、まず下写真の画面に戻り「単音素」をクリックすると「音素 A」「音素 N」「音素 E」・・・が出てくるのでそれを確認してください



⑤～⑨の出し方や場所が分かったら、下記のように音素の登録をしていきましょう

(例)「あ(音素 A)」をダブルクリックで切り出す→『単音素』の「音素 A」の「あ」の「登録」をクリック

「い(音素 N)」をダブルクリックで切り出す→『単音素』の「音素 N」の「い」の「登録」をクリック

「い(音素 E)」をダブルクリックで切り出す→『単音素』の「音素 E」の「い」の「登録」をクリック

「いう」の波形を出す→「い(音素 A)」をダブルクリックで切り出す→「単音素」の「音素 A」の「い」の登録をクリック

・・・を繰り返していきます



録音 file の基本フォルダから出す

該当する録音データをダブルクリック

\*ダブルクリックした時、全波形を指定してしまうことがありますが、その時は波形左上と右下にある▼▲(赤い三角)をドラッグして範囲を指定してください



⑩登録されると写真のように青くなります。頑張って地道にすべて登録していきましょう(結構時間かかります)


## ⑪調整作業

- ・左上方にある「読みの間隔」画面にし、「全体の読みの速さ」でお好みの速さに設定。読みの速さの%を小さくすると話すスピードが速くなります（個人的に60%前後がしっくりきた）
- ・「音素の時間の合わせ方」は今回は「元の音素のまま」で



## ⑫声を聴いてみよう

一度デスクトップに戻り「MyVoicePlayer」をダブルクリックし、出てきた画面の窓に何か文を入力し「読み上げ」をクリック（編集途中なら音素編集した画面の「読み上げテスト」から聴いても良いと思います）

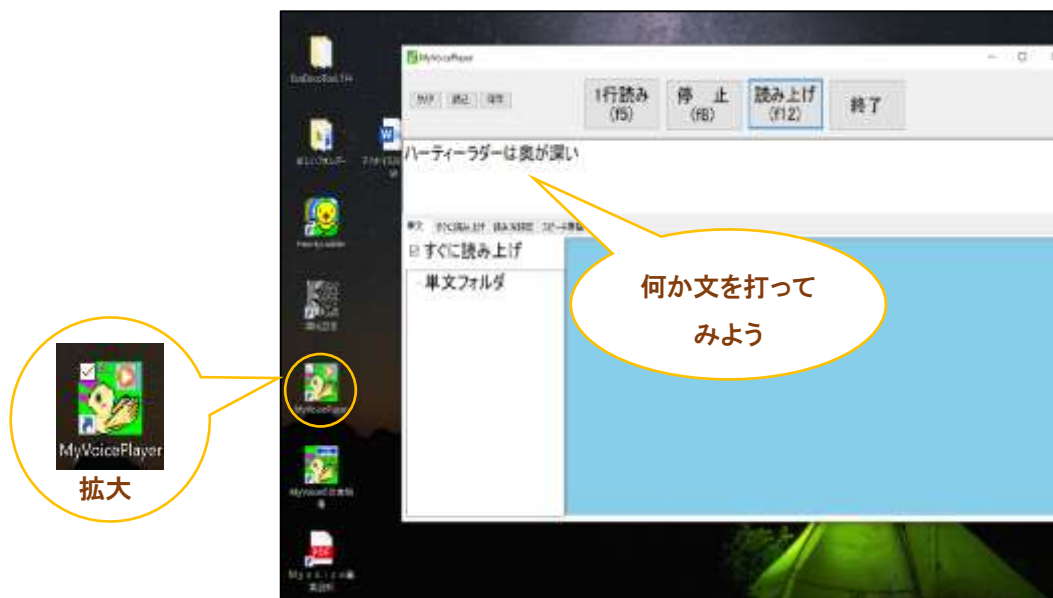

このように、ハートイーラダーをダウンロードしなくても、「マイボイス」のみをダウンロードすることでマイボイス再生をすることが可能です（もちろん後からハートイーラダーをダウンロードしてもマイボイスを反映させることは可能です）

\*今回はマイボイスの新機能「ガイド録音」の使い方と、マイボイスの切り出しについてまとめてみました  
ですので、まだまだ触れていない皆さんの機能があります  
ぜひぜひハートイーラダーのHPでいろいろな機能や使い方を覗きに行ってみてください