



ICレコーダーを使わずにパソコンのみで録音する方法

マイボイスをハーティラーダーのホームページからダウンロードし

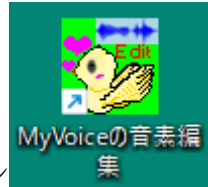

インストールしてできるアイコン (MyVoiceの音素編集) をクリックします。

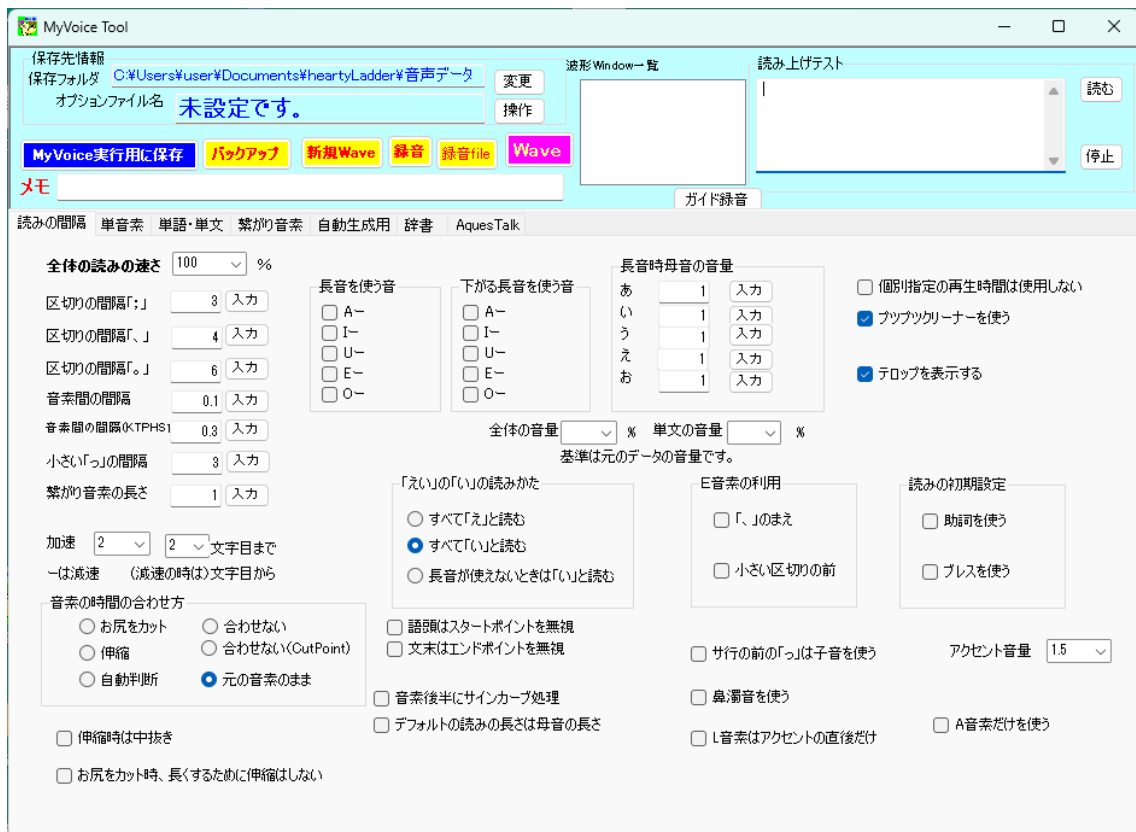

ここで



に注目してください。

パソコンを IC レコーダーとして使う




をクリックするとすぐ録音が始まります。




が表示されます。



をクリックすると

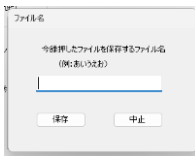


が表示されるので、

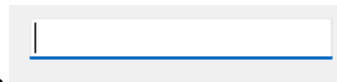


に


ファイル名を手入力して

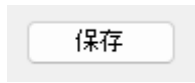

をクリックします。

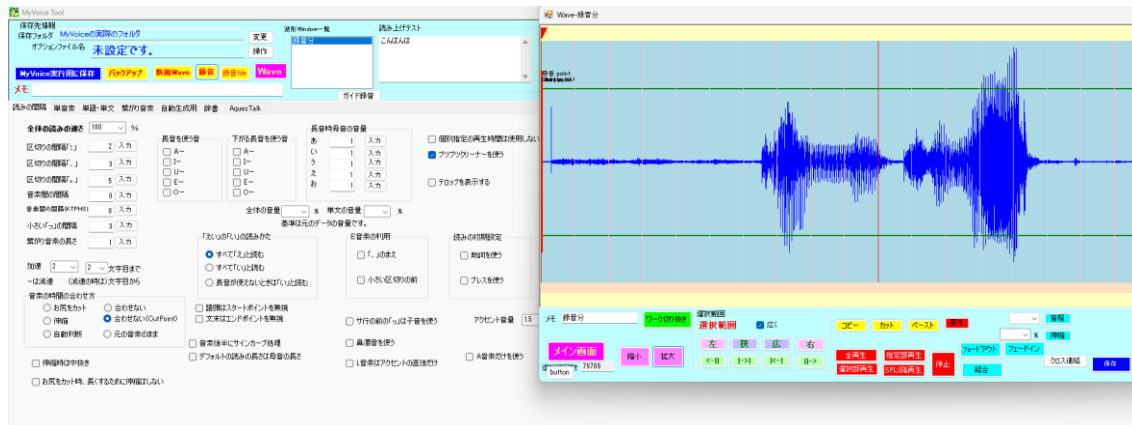

のように波形が表示されるので

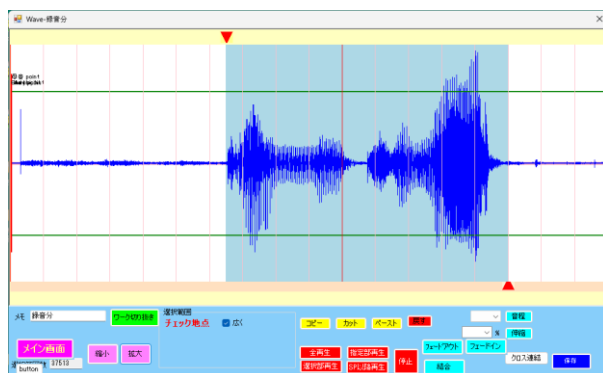

のように範囲を指定し、保存・登録を行い

連結

保存

ます。ファイルとして保存するときには

をクリックします。

あとからその録音ファイルを使うときは




をクリックして当該ファイル名をクリックします。

このようにするとパソコンを IC レコーダーとして使えますが、ノイズがのったり、患者さ

んには録音姿勢がとりにくかったりするので工夫が必要です。

IC レコーダーで録音したファイルをパソコンにコピーしたうえで、

録音file からそのファイルを指定するか、**新規Wave** をクリックして開く

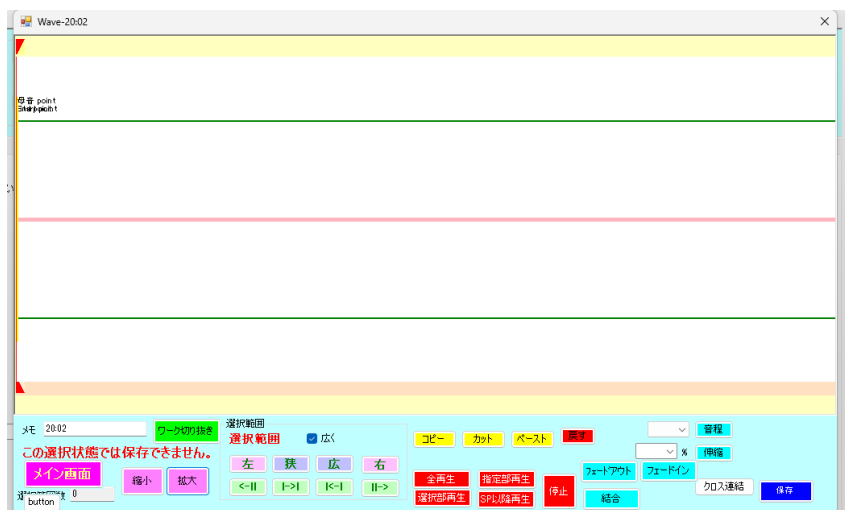


に、録音ファイルをド

ラッグすることで波形を表示することができます。

これは、紙で録音原稿を見ながらの操作です。


録音のための読み上げ文もパソコンで見ながら使う場合は

タブの右側

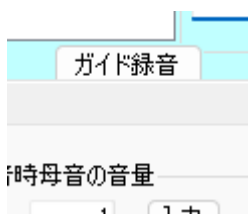

(ガイド録音) をクリックします。


すると

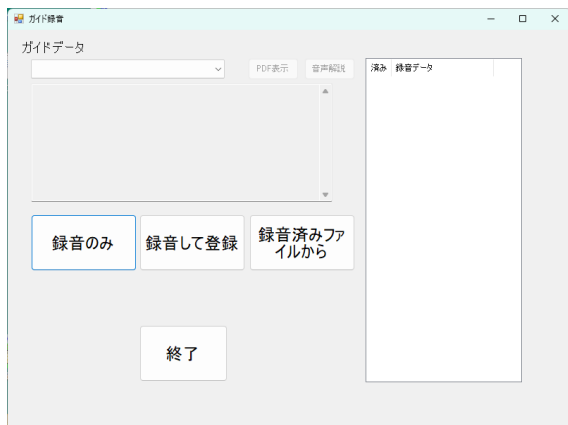

が出ます。




ここで
の右タブをクリックします。

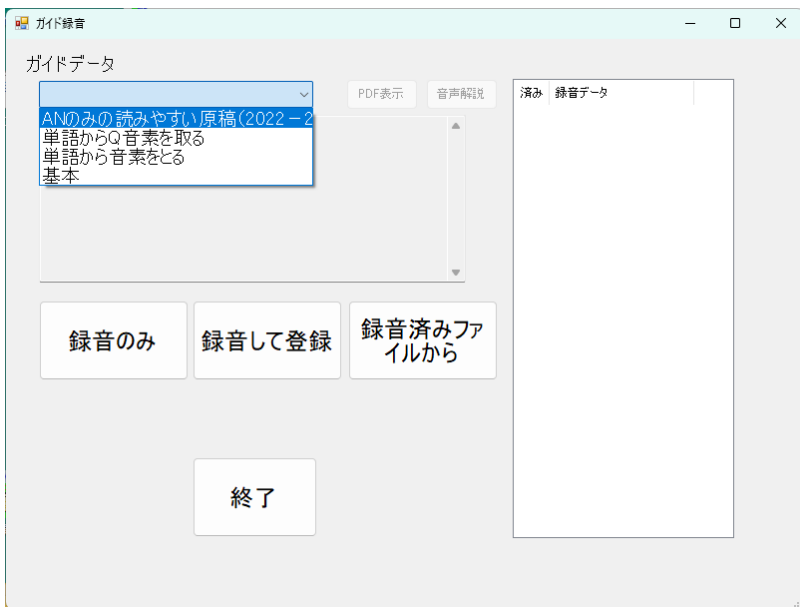

原稿を選択します。

「単語から音素をとる」を例にすると

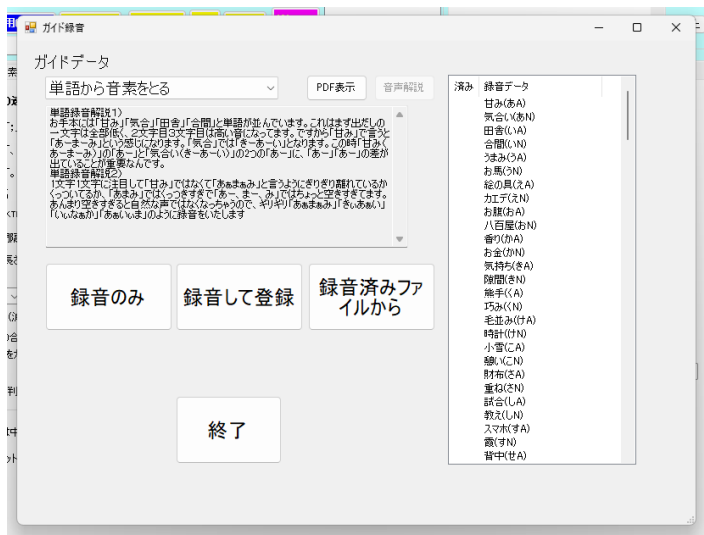

のように表示されるので、

、**録音データ**

上から **甘み(あA)** のようにクリックして1音節(音素)ごと録音していきます。

録音後、自動切り出しや手動登録ができます。

これについては、まだ試行錯誤していますので別な機会にご紹介します。

